



ANESTHÉSIE

Cryothérapie



**cryopad**

Le froid thérapeutique




Value Life

## Froid thérapeutique de longue durée


Le froid des compresses cryopad® pénètre en profondeur dans les tissus sous-cutanés. Il offre jusqu'à 3 heures de traitement et agit selon trois étapes successives :

1. Un choc thermique rapide de 10 min +/- 5mn abaisse la température cutanée en dessous de +12°C.
2. Le maintien de la température cutanée en dessous de +12°C pendant 1 h à 1 h 30.
3. Le ralentissement de la remontée en température des tissus sous-cutanés et cutanés durant 1 h à 1 h 30.

**Pour une sécurité absolue**, la température cutanée ne peut être inférieure à +6° +/- 1°C. Pendant cette phase le froid pénètre en profondeur dans les tissus sous-cutanés.

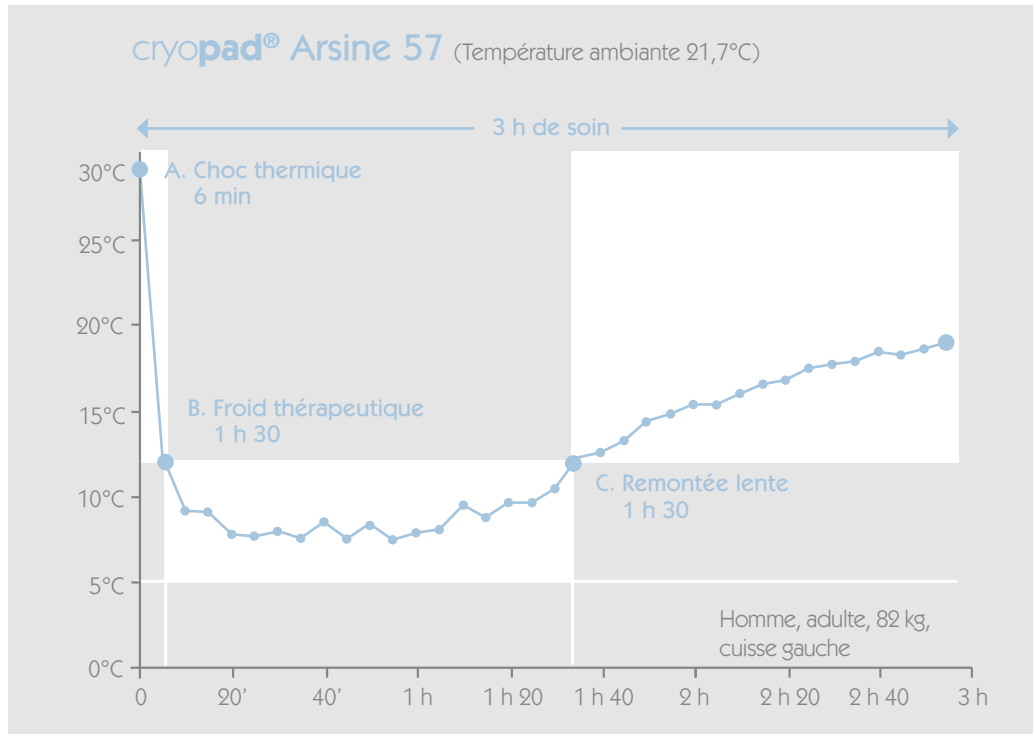

## Effet des compresses cryopad®

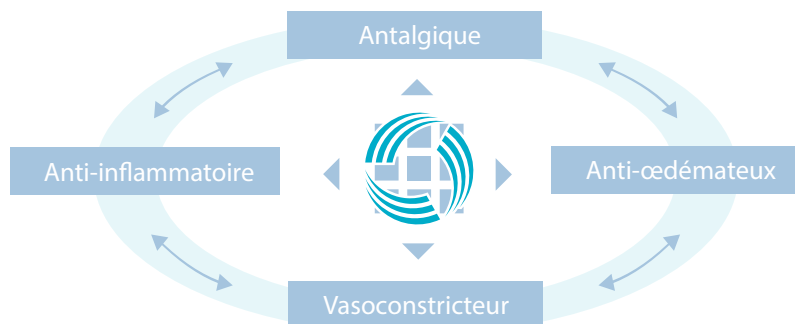


## S'adapte à toutes les parties du corps à traiter

La compresse cryopad® est naturellement flexible dans toutes les directions.

Pour encore plus de flexibilité, utilisez la prédécoupe brevetée pour dissocier un ou plusieurs éléments et pouvoir épouser au plus près la forme à traiter.

## Indications de la compresse cryopad®

Prise en charge non invasive et localisée des douleurs aiguës, de l'ecchymose et de l'hématome cutané, rencontrés entre autres :

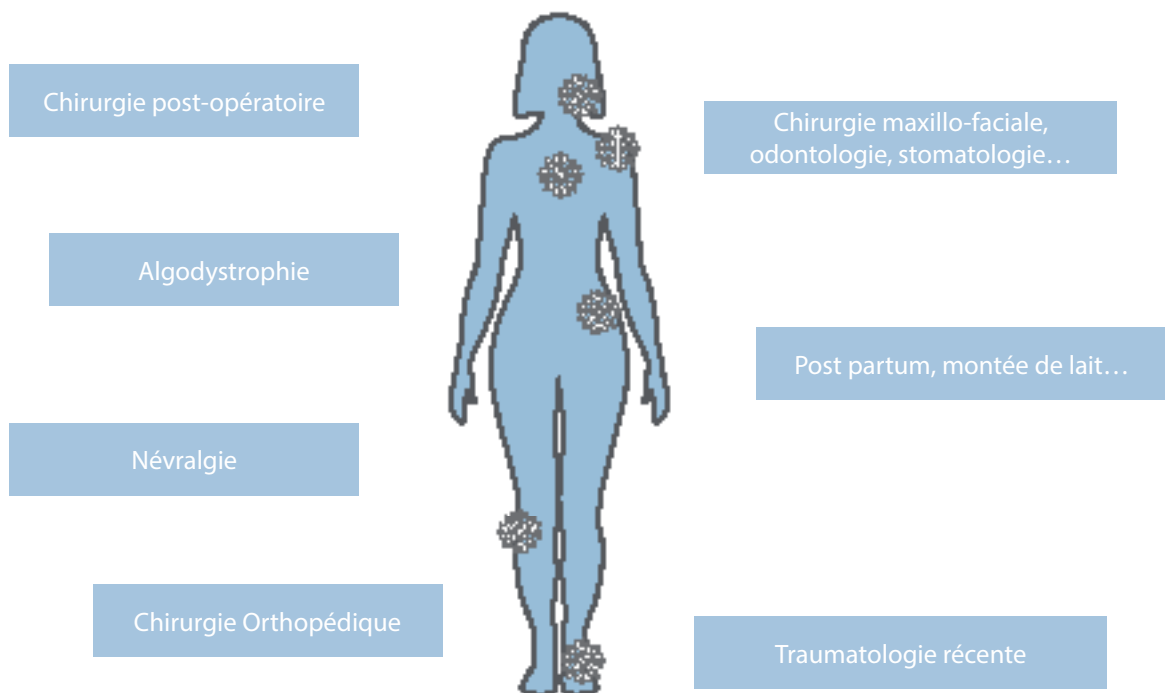



## Facile, sûr, économique

- Se pose à même la peau
- Ne nécessite pas de surveillance spécifique pendant le traitement
- Protège des risques intrinsèques de brûlure au froid
- Assure un confort d'utilisation pour le patient
- Décontaminé par irradiation aux rayons gamma
- Minimise les recontaminations manuportées grâce à son double emballage breveté (gamme Arsine & Brenva)
- Usage patient jetable après traitement




## Références et caractéristiques

Désignation	Code	Dimension cryopad		Présentation	Nombre de cryopad	Qté par carton	Photo
		Long. (cm)	Larg. (cm)				
Arsine 52	VAGARSINE52	23	9,6	Plateau	8 par plateau	36	 Plateau Arsine
Arsine 53	VAGARSINE53	23	14,4	Plateau	8 par plateau	27	
Arsine 55	VAGARSINE55	24	23	Plateau	8 par plateau	18	
Arsine 57	VAGARSINE57	33,6	23	Plateau	8 par plateau	18	
Silvretta	VAGSILV5600	288	23	Rouleau	1 rouleau	2 rouleaux	 Rouleau Silvretta

### 1 barrette

Pour visionner le mode d'emploi **Arsine**

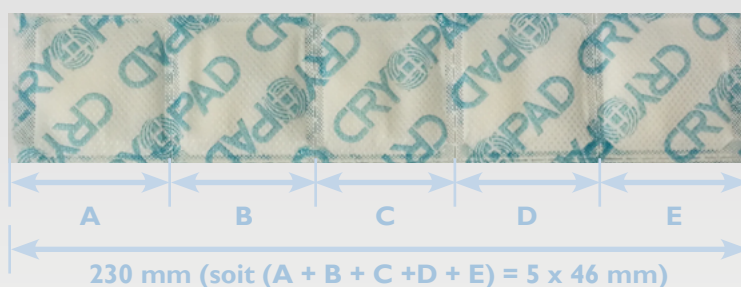

Pour visionner le mode d'emploi **Silvretta**



1 rouleau = 600 barrettes

cryopad est un dispositif médical de Classe I, irradié aux rayons gamma, conforme à la directive 93/42/CEE. Dispositif fabriqué par Antartic médical et distribué par Vygon.

## GESTION DE LA DOULEUR ET RESPIRATOIRE

Pour plus d'informations, contactez-nous : [questions@vygon.com](mailto:questions@vygon.com)

Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre d'information uniquement et n'ont pas de valeur contractuelle.

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE

SIRET : 325 241 750 00067 • RCS Pontoise

Reception: +33 (0)1.39.92.63.63 – Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81

Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15

Fax.: +33 (0)1.39.92.64.44 • [www.vygon.com](http://www.vygon.com)



[www.vygon.com](http://www.vygon.com)